

## Hinweise für die Untersuchung von Hunden und Katzen auf Tollwutantikörper

Stand: Januar 2025

Die LUA Chemnitz ist ein für die Durchführung der serologischen Tests zur Kontrolle der Wirksamkeit der Tollwutimpfstoffe zugelassenes Labor und grundsätzlich für die Untersuchung von Proben aus dem Sächsischen Hoheitsgebiet zuständig.

Nachstehende Hinweise sollen die Probenahme und die Einsendung erleichtern:

### Material:

- sterile Blutentnahme (ca. 3–4 ml) erfolgt durch einen approbierten Tierarzt
- bei der Blutentnahme bitte Probenröhrchen **ohne Gerinnungshemmer** verwenden
- Serumprobe (ca. 1 ml) in ein bruchsicheres Probengefäß abfüllen und eindeutig beschriften (z. B.: Mikrochipnummer)

### Untersuchungsauftrag:

- für jedes Tier je einen Untersuchungsauftrag verwenden
- vollständiges Ausfüllen aller Felder
- Unterschrift von Tierhalter und Tierarzt
- zur schnelleren Befundübermittlung können Sie Ihre Email-Adresse oder Fax-Nr. angeben (Feld „Bemerkungen“)

### Probentransport:

- zeitnah nach Blutentnahme
- Probe auslauf- und bruchsicher zusammen mit dem Untersuchungsauftrag verpacken
- ungekühlt per Post an die LUA Chemnitz versenden

**LUA Sachsen**  
**Standort Chemnitz, FG 3.4 Virologie**  
**Zschopauer Str. 87**  
**09111 Chemnitz**

- gegebenenfalls über das zuständige Veterinäramt einsenden

### Untersuchungsmethode:

- Fluoreszenz-Antikörper-Virus-Neutralisationstest (FAVN)

### Bearbeitungszeit:

- Je nach anfallender Probenzahl kann die Bearbeitungszeit 14 bis 28 Tage betragen.
- In dringenden Fällen bitten wir um telefonische Rücksprache (Zentrale: 0351/8144-3900).

### Benachrichtigung:

- Befundmitteilung per Briefpost an Tierhalter, Tierarzt und Veterinäramt
- Befund in deutscher und englischer Sprache